

ATASHMENTET STICK-ON, GATI PER NGJITJE

Atashmentet janë atake në kompozit qëllimi i të cilëve është garantimi i pozicionimit të maskerinave në harkadën dentare, që mundëson më pas lëvizje precize.

Functional Research mundëson furnizimin me konfeksion në mënyrë të mundur që të mund të ngjisësh në pak minuta në mënyrë të thjeshtë. Atashmentet Stick-On shmangin orët e punës në poltron dhe ulin rrezikun e krijimit të spesorëve ose precizionin e ulët të cilët mund të çojnë në dështimin e trajtimit.

Kompoziti në të cilin janë ndërtuar është shumë rezistent dhe i ngurtë në mënyrë që të mos konsumohet ose cifloset. Gjatë testeve të Funkcional Research me ekspertë të shquar të sektorit është përzgjedhur kompoziti Clearfil Majesty ES-2 për motivin e rezistencës, fortësisë dhe precizionit që ka. Adezivi i zgjedhur dhe rekomanduar është Clearfil SE Bond 2, edhe ky nga Kuraray.



CHEWIES

Për të lejuar maskerinave Dental Stealth® të fundosen në perfeksion, pacienti, çdo herë që vendos maskerinën duhet të kafshojë cilindër gome të quajtur Chewies.




MBAJTESI DINAMIK (Retainer Dinamik)

Ndërtuar në një pllakë të vecantë që do të dorëzohet mbas një kontrolli nga ana e Funkcional Research në fund të terapiës për të korrigjuar gabimet e ndryshme që mund të kenë lindur.

Për të porositur këtë aparat duhet të dërgohen masa të reja me alginate pa l hequr atakët nga dhëmbët.

Në qoftë se dentist mendon që nuk është e nevojitshme, mund të zëvendësohet me një maskerinë mbaitëse (Retainer).

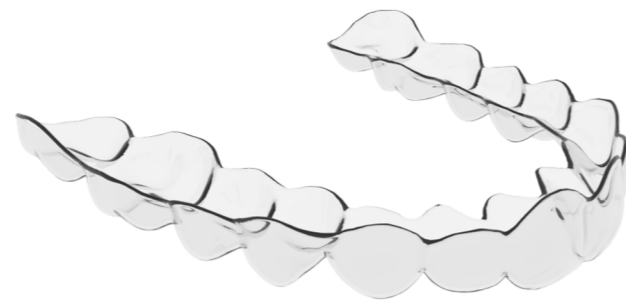

DENTAL
STEALTH

Me ne është më e lehtë

Thjeshtësi në
përdorim për
dentistin dhe
pacientin

Transparencë
dhe rezistencë
shumë e lartë

MAXIMUM DIVISIONE DENTALE

Durrës, Shqipëri Logja 17,
Rruga "Stefan Kaculini"
Pallati "Port View"

Tel. +355 69 636 6262
maxident.albania@gmail.com
www.maximumdentale.com



www.dentalstealth.com

www.dentalstealth.com

I nderuar Doktor/Doktoreshë,
sistemi i trajtimit të padukshëm Dental Stealth® është zhvilluar me bashkëpunimin e dentistëve, laborantëve, inxhenjerëve, fizikantëve, posturologëve, ekspertëve të programeve 3D dentar dhe industrial me objektivin që ti ofrojnë klinikistit maksimumin e mbështetjes teknike, për të bërë ekzekutimin e terapisë të sigurtë me maksimumin e konfortit për pacientin.

MASKERINAT DENTAL STEALTH®

Maskerinat transparente Dental Stealth® janë plotësisht transparente dhe nuk kanë rriga ne sipërfaqen e tyre, të cilat mbajnë pllakat bakteriale.



Allineatore Dental Stealth®



Allineatore Generico

Jashtëzakonisht rezistente, nuk kanë probleme zverdhje dhe ndryshime të cilësisë fizike edhe pas disa javëve përdorimi.

Këto cilësi lejojnë që të ripërdoret dhe të rritet koha e përdorimit të një maskerine në qoftë se rezultati nuk është arritur akoma.

Falë sistemit të heqjes SNAP, i cili parandalon thyerjen dhe nga materiali i cili ndertohet, maskerinat nuk thyhen dhe është më e thjeshtë për pacientin për ti hequr.

PREVENTIMI SMART

Është e mundur të marrim një preventiv smart të shpejtë duke dërguar në WhatsApp, në numrin +355 69 63 662 62, gjashtë fotot e përshkruara në protokollin e sistemit Dental Stealth®, të bëra me smartphone.



Vizitoni faqen tonë web për të patur më shumë informacione rreth preventivit **SMART**.




PREVENTIVI ME PROJEKT

Në rastet që kanë vështirësi për të bërë preventivin SMART, bëhet preventive me projekt.

1. Përpunim I plote virtual të rastit me parashikim real të numrit të maskerinave që duhen,
2. Pozicionimi I atashmentëve,
3. Ku mund të nevojitet stripping,
4. Preventive komplet dhe filmimi për pacientin ku shikohet drejtimi i dhëmbëve.

Preventive me projekt ka cmim 150 Euro që do të zbritet nga vlera e maskerinave në rast se do të pranohet rasti.

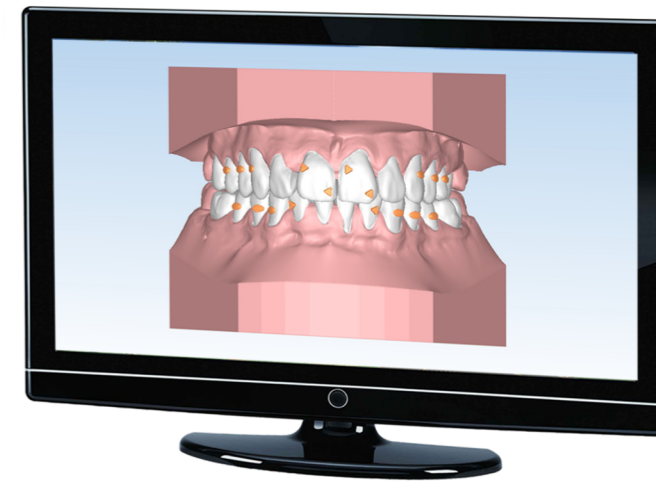

DORËZIMI I MASKERINAVE

1. Maskerinat Dental Stealth® dorëzohen zakonisht në 1, 2 ose më shumë rradhë (në varësi të lëvizjeve dentare në vazhdim)
2. Në konfeksion do jenë prezente modelet (prototipet) e referimit. Në këtë mënyrë klinikisti mund të kontrollojë ecurinë e rastit në çdo ndërrim maskerine, duke konfrontuar harkadën e pacientit me modelet.

VERIFIKIMI I KOHËZGJATJES

Lejon që Funcional Research të mbajë nën kontroll ecurinë e trajtimit. Pasi pacienti të trajtohet për kohën e përcaktuar (10 maskerina) tek maskerina e fundit e parashikuar, kërkohet marrja e një mase të re me alginat.

Në qoftë se sposimi i dhëmbëve do të jetë sipas parashikimeve vazhdohet me prodhimin e maskerinave të radhës. Në rast të kundërt do të sugjerohen korigjimi I difekteve, ose do të modifikohet për të arritur aty ku ishte parashikuar në kohën e parashikuar.